

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Kids-e-Dental[®]



Bioflex

Crown

Las coronas Bioflex son las primeras pediátricas preformadas flexibles, duraderas, autoadaptables y estéticas del mundo que ofrecen propiedades tanto de coronas de acero inoxidable como de coronas de zirconia.



COMPOSICIÓN DE MATERIALES

Fabricados con polímero de resina híbrida de alto impacto, utilizados en el sector médico, que requieren alta resistencia, flexibilidad y durabilidad. No contienen metal ni Bis-GMA.



FLEXIBLE

Naturaleza distintivamente flexible y versátil



DURABLE

Gran resistencia y aguante



ESTÉTICO

Estética de aspecto natural y color del diente, sin metal



AUTOADAPTABLE

Automáticamente a la nueva oclusión

DISEÑO ÚNICO

Las coronas Bioflx tienen algunas características de diseño únicas en las coronas anteriores y posteriores.




DISEÑO POSTERIOR



DISEÑO ANTERIOR



KIT INTRODUCTORIO 24 CORONAS

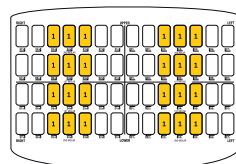

(D&E) RH - 3,4,5 (1 unidad cada una)
(D&e) UL - 3,4,5 (1 unidad cada una)
(D&E) LR - 3,4,5 (1 unidad cada una)
(D&e) LL - 3,4,5 (1 unidad cada una)

CORONAS PARA MOLARES PERMANENTES

Las primeras coronas de cobertura total del mundo para molares permanentes jóvenes, flexibles, duraderos y estéticas.

"EL DISEÑO INTELIGENTE PARA UNA PREPARACIÓN MÍNIMA Y RÁPIDA"

CARACTERÍSTICAS

> FLEXFIT:

Su flexibilidad y versatilidad permiten una fácil colocación y un ajuste perfecto.

> TECNOLOGÍA AUTOADAPTATIVA:

En lugar de desgastarse, las coronas Bioflx se adaptan formando una hendidura en zonas de alta oclusión.

> RADIOPACA:

Su radiopacidad de aproximadamente 1 mm permite evaluar los márgenes de la corona y la cámara pulpar.

> AJUSTABLE:

Se puede recortar y contornear.

> ESTÉTICA:



Coronas monocromáticas sin metal, del color del diente, fabricadas con un material totalmente biocompatible que disimula la decoloración de las caries detenidas.

> DURADERA:


Fabricada con resina polimérica híbrida biocompatible de alta resistencia y durabilidad.

> RETENCIÓN MEJORADA:


Superficie interna arenada para una mayor retención con cementos RMGI y GMI de fraguado automático.

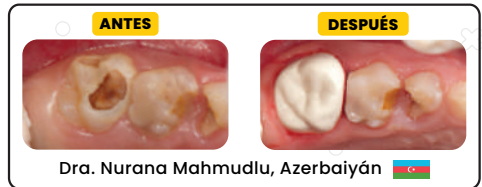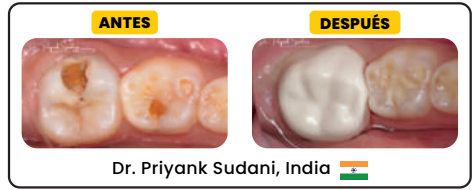

DISEÑO PARA MOLARES PERMANENTES

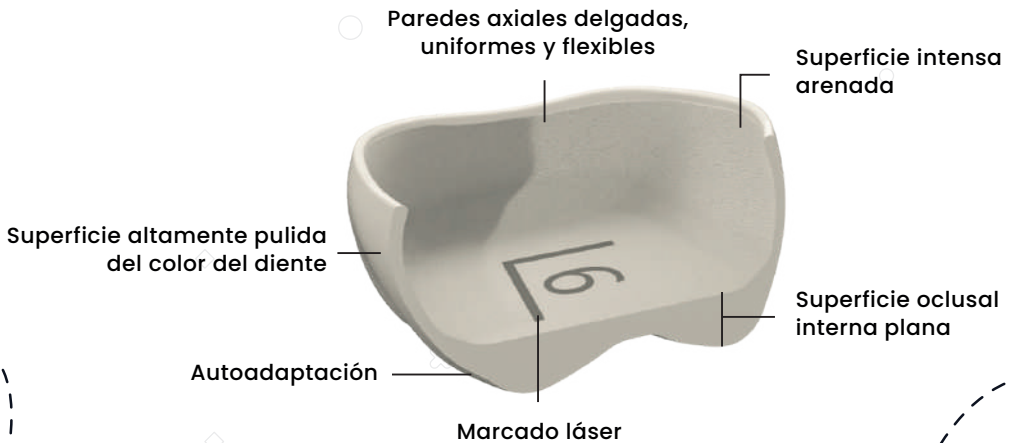

Es un restaurador de ionómero de vidrio reforzado con resina, autoadhesivo, fotopolimerizable, fluido y listo para usar. Con excelente adhesión dental, liberación sostenida de flúor y facilidad de uso, es ideal para una amplia gama de aplicaciones restauradoras.

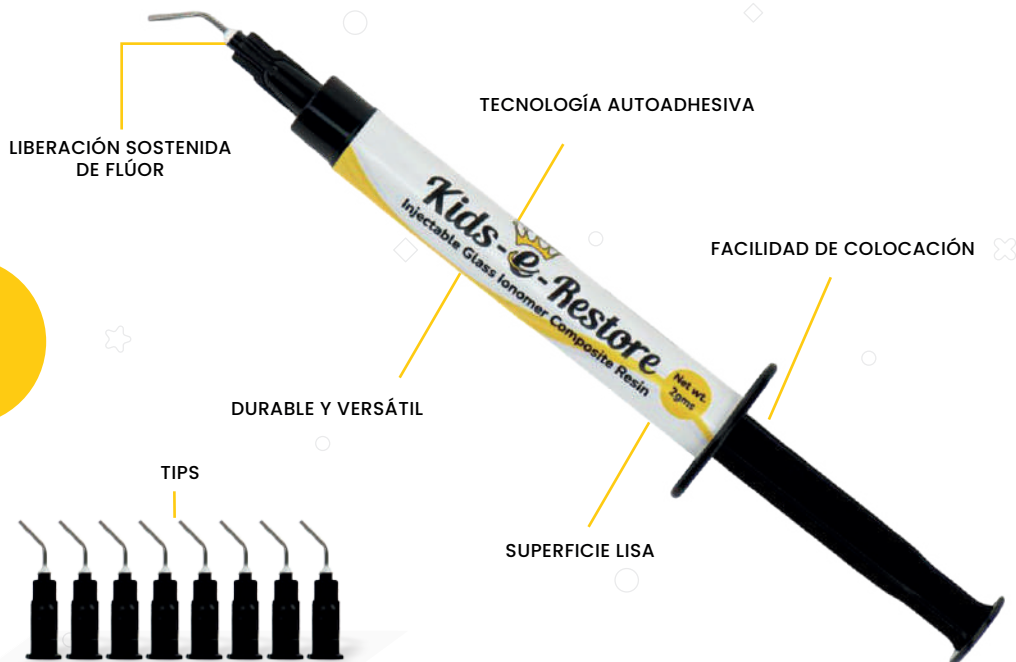

CARACTERÍSTICAS

1. TECNOLOGÍA AUTOADHESIVA

Elimina los procedimientos de grabado y unión
Propiedades de autograbado con adhesión química

2. LIBERACIÓN SOSTENIDA DE FLÚOR

Promueve la actividad antimicrobiana y anticaries

3. FACILIDAD DE COLOCACIÓN

Viscosidad cuidadosamente equilibrada para una colocación fácil y cómoda
Altamente tixotrópico, se mantiene perfectamente en su lugar y mantiene su forma

4. DURADERO Y VERSÁTIL

Demuestra un rendimiento físico similar al material GIC normal
Adecuado para diversas aplicaciones restauradoras, incluidas reconstrucciones de muñones y sellado de fisuras extendidas

5. SUPERFICIE LISA

Proporciona un acabado suave y estético

INDICACIÓN

- Revestimiento bajo todo tipo de material de relleno
- Sellado de fisuras extendido
- Material para construcción de muñones
- Restauración de lesiones pequeñas
- Restauraciones mínimas de clase I, II y III
- Restauraciones clase V
- Restauraciones de la superficie radicular
- Rellenos semipermanentes



COMO UTILIZAR



Rellene la cavidad con Kids-e-Restore



Espere 20 segundos



Fotopolimerización

DIRECCIÓN DE USO

1. PREPARACIÓN

Limpiar y aislar
Crea una cavidad brillante

2. APLICACIÓN

Aplicar capa fina
Distribuya uniformemente,
dejar para 20 segundos

3. FOTOCURADO

Curar durante 20 segundos
Aplicar en incrementos de 2mm

4. POST-APLICACIÓN

Acabar y pulir

5. INDICACIONES PARA EL PACIENTE

No comer durante una hora

REPORTE DE CASO

Dr. Mukul Jain 



Preoperatorio



Postoperatorio

1 jeringa de 2grs y 8 puntas aplicadoras



¿QUE ES EL FLUORURO DIAMINO DE PLATA?

El fluoruro diamino de plata (FDA) es una sustancia líquida que ayuda a prevenir la formación, el crecimiento y la propagación de caries a otros dientes. Es una alternativa segura e indolora a la caries tradicional.

Se aprobó por primera vez para su uso en Japón hace más de 80 años. La administración de alimentos y medicamentos de los E.E.U.U. (FDA) aprobó en 2014 para su uso en los Estados Unidos.

INDICACIONES

- . Lesión cariosa asintomática (Detención y prevención de caries).
- . Lesiones cariosas que no se pueden tratar en una sola visita.
- . Caries radicular.
- . Sensibilidad dental.
- . Lesiones difíciles de tratar.
- . Pacientes con necesidades especiales de atención médica, fobia dental grave, afecciones de alto riesgo y pacientes inmunodeprimidos.
- . Pacientes sin acceso a la atención odontológica tradicional.
- . Pacientes no indicados para anestesia general o sedación oral.
- . Recubrimiento pulpar indirecto.



USOS EN ODONTOLOGÍA GENERAL

- Útil para pacientes poco cooperativos y ansiosos.
- Tratamiento de la hipersensibilidad.
- Control de la preparación de los dientes vitales hipersensibilidad.
- Recubrimiento pulpar indirecto.
- Lesiones de difícil acceso como caries radiculares y terceros molares.

BENEFICIOS

- **INDOLORO:** No requiere anestesia
- **NO INVASIVO:** No requiere perforación
- **AHORRO DE TIEMPO:** Fácil de usar
- **1 gota = hasta 5 superficies**
- **Botella de 3,25 ml que puede abastecer de 100 a 130 pacientes**



ESTUDIO DE CASOS CLÍNICOS



PREOPERATORIO



DETENCIÓN DE CARIES




RELLENO DE GIC



e-SPACE MAINTAINER™

Es un mantenedor de espacio preformado utilizado en odontología pediátrica para prevenir la pérdida prematura de espacio.

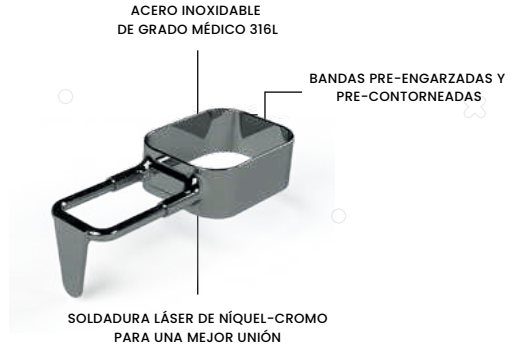

VENTAJAS

- Cita única
- Sin impresión ni vertido de modelo
- Preciso y sin errores de laboratorio
- Las bandas universales disminuyen el inventario
- Rentable
- Muy útil en casos de sedación








e-Pit & Fissure Sealant

SELLADOR DE FISURAS Y FOSAS

El sellador de fisuras y fosas e-Pit es la primera solución bioactiva reforzada con nanoplate del mundo para protección óptima, adhesión y liberación prolongada de flúor.

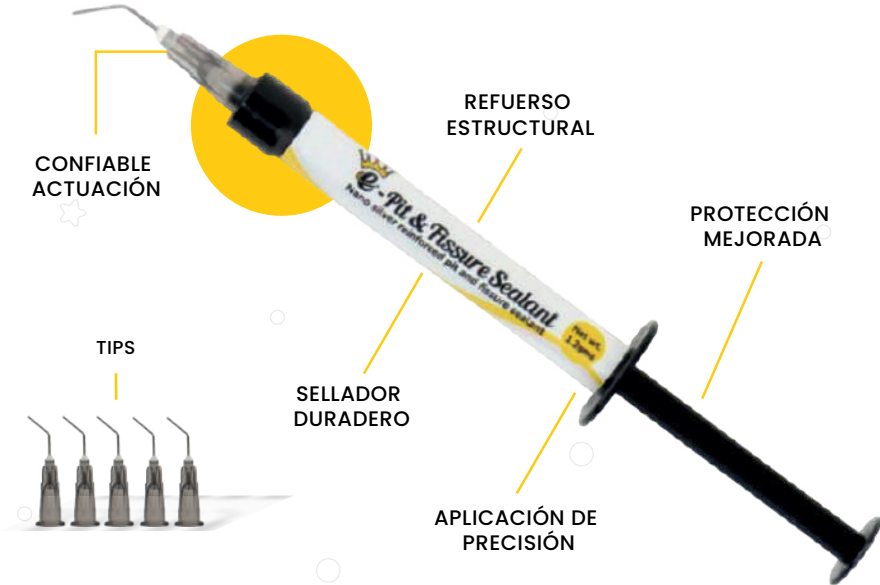

CARACTERÍSTICAS

1. PROTECCIÓN MEJORADA

Cuenta con tecnología antimicrobiana Silver Nano para una mayor actividad antimicrobiana. La tecnología de superficie suave y vidriosa evita la acumulación de placa. Reduce significativamente la desmineralización dental y promueve una mayor remineralización.

2. FORTALECIMIENTO ESTRUCTURAL

Facilita la remineralización, reforzando la estructura dental para una mayor protección durante los ataques ácidos.

3. SELLADOR DURADERO

Asegura una excelente retención, sellando los márgenes contra microfugas. Ofrece resistencia a largo plazo al desgaste, astillado, agrietamiento y fractura.

4. RENDIMIENTO CONFIABLE

Resistente a la solubilidad oral. Minimiza la contracción por polimerización y la formación de espacios.

5. APLICACIÓN DE PRECISIÓN


Excelente fluidez penetra incluso en los hoyos y fisuras más pequeños.

INDICACIÓN

SELLA FOSAS Y FISURAS


¿CÓMO UTILIZAR?

PASO 1

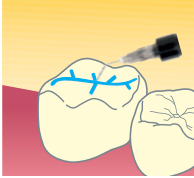

Etch

PASO 2

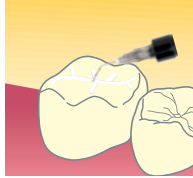

Sealing

PASO 3



Light Cure

INSTRUCCIONES DE USO

1. GRABADO

Aplique ácido fosfórico al 35% como agente de grabado durante 30 segundos

2. SELLO

Dispensar e-pit y sellador de fisuras en la superficie oclusal

3. CURA

Curar con luz durante 30 segundos por superficie utilizando dispositivos convencionales

REPORTE DE CASO

Dr. Mukul Jain



Preoperatorio



Postoperatorio



1 jeringa de 1,2 gms y 5 puntas aplicadoras

e-MTA® & e-MTA Putty

e-MTA (agregado de trióxido mineral) es un cemento bioactivo constituido por partículas hidrófilas muy finas de varios minerales.




- 🦷 **BIO-ACTIVO**
- 🦷 **LAVADO RESISTENTE**
- 🦷 **AJUSTE RÁPIDO**
- 🦷 **EMBALAJE INTELIGENTE**
- 🦷 **TECNOLOGÍA BASADA EN GEL**

e-MTA es una pasta biocerámica premezclada, insoluble, radiopaca y bioactiva que consta de partículas hidrófilas muy finas de varios óxidos minerales.



INDICACIONES

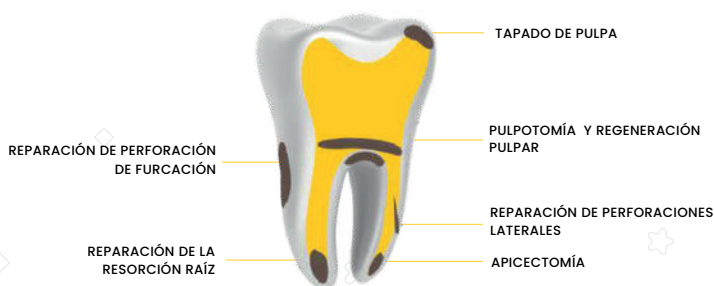





1 jeringa de 0,65 g

ESTUDIO DE CASO CLÍNICO

Caso de pulpotomía e-MTA en dientes primarios

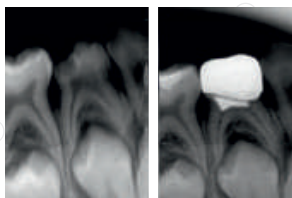

Caso de apexificación con e-MTA en dientes primarios
por el Dr. Mayur Bhattad

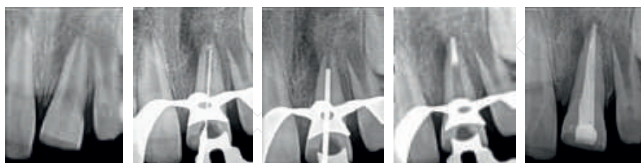


REACCIÓN ADVERSA

No se conocen contraindicaciones ni efectos secundarios

e-MTA Sealer

El sellador e-MTA, es un sellador biocerámico premezclado, insoluble, radiopaco y bioactivo que consiste en partículas hidrófilas muy finas de varios óxidos minerales.

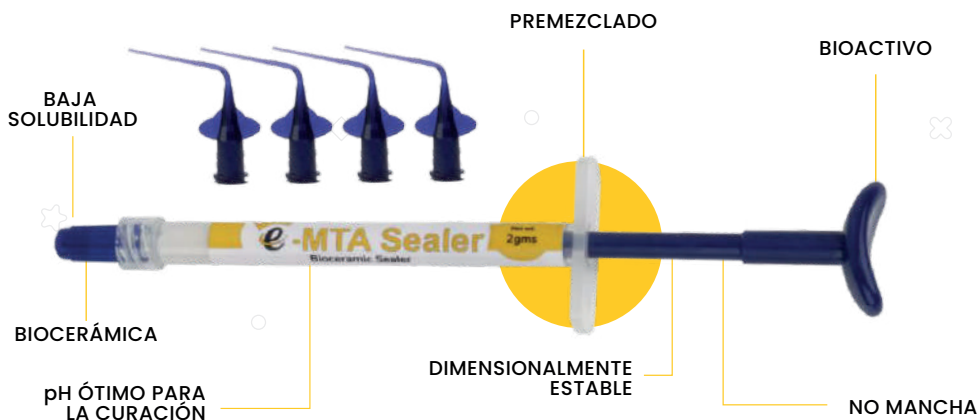


INDICACIONES

1 jeringa de 2 g



e-lodoCal

Pasta de hidróxido de calcio premezclada que contiene yodoformo con radiopacidad mejorada y efecto antimicrobiano.

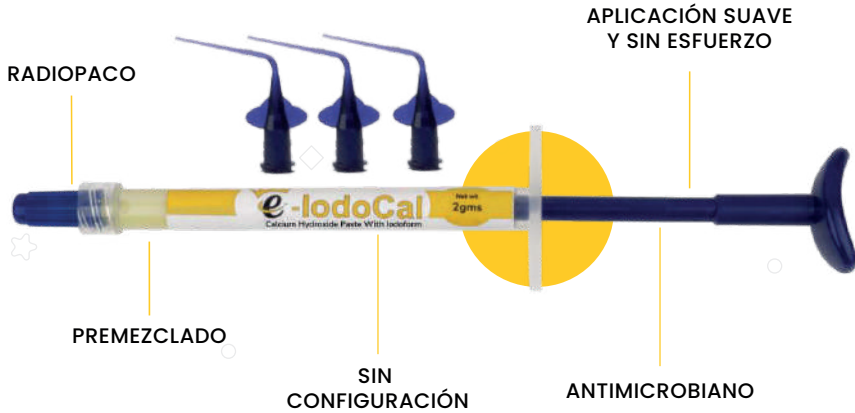

INDICACIONES

- Material de relleno de conducto radicular permanente para dientes primarios
- Material de relleno temporal para conductos radiculares infectados
- Estimula la apexificación
- Tratamiento de la reabsorción radicular



1 jeringa de 2g y 3 puntas aplicadoras

Scented-e-Pens

Bolígrafos aromatizados para mejorar la experiencia con la sedación por óxido nítrico.

ACERCA DE

Scented-e-pens es un dispositivo manual, sin alimentación eléctrica, que incorpora un núcleo absorbente interno impregnado con una fragancia desarrollada mediante una formulación aprobada internacionalmente y en pleno cumplimiento de las normas internacionales de seguridad.



VENTAJAS

- Elimina la necesidad de utilizar mascarillas prearomatizadas.

Marcado incoloro.

Anima a los pacientes a continuar respirando a través de la mascarilla.

Proporciona apoyo mental y emocional durante el tratamiento.

Aplicación rápida y sencilla.

Mejora la aceptación de la mascarilla en pacientes pediátricos.

De 25 a 30 aplicaciones por bolígrafo.

Duración prolongada del efecto (30-40 minutos).



SABORES DISPONIBLES

- Watermelon Flavour
- Fruit Punch Flavour
- Mango Flavour
- Strawberry Flavour



¿COMO USARLO?

Paso 1



Preguntale al paciente cuál es su aroma preferido.

Paso 2




Retire la tapa del Scented-e-Pens.

Paso 3



Aplique una capa sobre la superficie interna de la mascarilla.

Paso 4

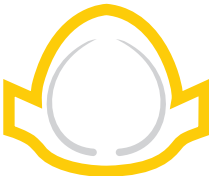

Permita que la fragancia se disperse durante unos segundos.

Paso 5



Coloque la mascarilla sobre la nariz del paciente siguiendo el protocolo estándar de sedación.

Dento

TRANSFORMANDO TU CONSULTA




Kids-e-Dental